 Universidade Federal da Bahia		Sistema de Desenvolvimento Institucional PO - Procedimento Operacional		
Unidade	Faculdade de Odontologia			
Processo	Esterilização e dispensação de material estéril	Identificação PO/FOUFBA/CME/02	Versão 00	Nº de folhas 1 de 4

Glossário de Siglas e Termos

Autoclaves - Equipamento que realiza o processo de esterilização através de vapor úmido aquecido e sob pressão

Caixa perfurada – Caixa com furos, utilizada para acondicionar e esterilizar material médico/cirúrgico

CME – Centro de Material e Esterilização

Papel Grau Cirúrgico – Papel utilizado no acondicionamento de material cirúrgico no processo de esterilização em autoclaves

Seladora de bancada – Equipamento utilizado para selagem do papel grau cirúrgico com instrumental - pacote

Setor Limpo – Área destinada à recepção e limpeza do instrumental

Setor Sujo – Área destinada ao preparo e esterilização do instrumental

I. OBJETIVO

Esterilizar e organizar pacotes com instrumental cirúrgico para dispensação aos alunos.

II. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012 - Resolução da Diretoria Colegiada - ANVISA

Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde.

Resolução ANVISA RDC 306, de 7 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

NBR 12808, de 30 de janeiro de 1993 - Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado.

NBR 12810, de 30 de janeiro de 1993 - Fixa os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa dos resíduos de serviços de saúde, sob condições de higiene e segurança.

NR 32 - MTE - Estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de assistência à saúde

Elaborado por Jandira Fernandez / Paulo Marques	Aprovado por Marcel Lautenschlager Arriaga	Data 11/04/16
---	--	-------------------------

Processo	Esterilização e dispensação de material estéril	Identificação	PO/FOUFBA/CME/02	Versão	00	Nº de folhas	2 de 4
-----------------	---	----------------------	------------------	---------------	----	---------------------	--------

III. RESPONSABILIDADES

- **Auxiliar Técnico da CME:** Acondicionar pacotes no cesto de autoclave; carregar autoclaves; esterilizar pacotes de instrumentais; descarregar autoclaves; organizar pacotes para dispensação e dispensar material.
- **Aluno** – Solicitar pacote com instrumental

IV. MATERIAL NECESSÁRIO

E.P.I: Guarda-pó, óculos de proteção, máscara facial, avental impermeável, luvas de látex de cano longo e calçados fechados

Seladora de bancada

Papel grau

Detergente enzimático – Solução preparada

Escova de cerdas e cabo longo

Toalha

V. PROCEDIMENTOS

1. Auxiliar Técnico(a) do CME condiciona os pacotes no cesto da autoclave
 - 1.1. Os pacotes devem ser acondicionados no cesto da autoclave, na posição vertical, sem super lotação, permitindo que o vapor possa circular entre os mesmos
2. Auxiliar Técnico(a) do CME carrega as autoclaves
3. Auxiliar Técnico(a) do CME inicia processo de esterilização

As autoclaves são programadas para esterilização por 50 minutos, a uma temperatura de 134°C (vapor úmido).
4. Auxiliar Técnico(a) do CME, ao término do processo, aguarda o resfriamento natural dos pacotes
5. Auxiliar Técnico(a) do CME descarrega autoclaves
6. Auxiliar Técnico(a) do CME organiza pacotes nos nichos apropriados
 - 6.1. Confere identificação em cada pacotes e condiciona de acordo com o nicho do(a) respectivo(a) aluno(a)

Cada nicho é identificado com nome completo, matrícula e foto do aluno(a)
7. Aluno(a) comparece ao Setor Limpo e solicita pacote com instrumental
8. Auxiliar Técnico(a) do CME identifica aluno através do RG, localiza seu pacote no nicho e entrega
 - 8.1. Registra a entrega de material no Formulário de Entrega de Material Estéril (FormCME02)
 - 8.2. Solicita assinatura do(a) aluno(a)
 - 8.3. Entrega o pacote ao aluno(a)

Elaborado por Jandira Fernandez / Paulo Marques	Aprovado por Marcel Lautenschlager Arriaga	Data 11/04/2016
---	--	---------------------------

Processo	Esterilização e dispensação de material estéril	Identificação	PO/FOUFBA/CME/02	Versão	00	Nº de folhas	3 de 4
-----------------	---	----------------------	------------------	---------------	----	---------------------	--------

Fim do processo

VI. FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS

FormCME02 – Modelo do Formulário de Entrega de Material Esterilizado



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO



FORMULÁRIO DE ENTREGA DE MATERIAL ESTÉRIL

Data	Material Solicitado	Quantidade	Disciplina	Entregue por	Assinatura (Aluno)


VII. CONTROLE DE REGISTROS

Nome do Registro	Código	Responsável pela coleta	Indexação	Acesso	Tipo de Arquivo	Local de Arquivo	Tempo de Retenção	Disposição
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaborado por Jandira Fernandez / Paulo Marques	Aprovado por Marcel Lautenschlager Arriaga	Data 11/04/2016
---	--	---------------------------

Processo	Esterilização e dispensação de material estéril	Identificação	PO/FOUFBA/CME/02	Versão	00	Nº de folhas	4 de 4
-----------------	---	----------------------	------------------	---------------	----	---------------------	--------

VIII. FLUXOGRAMA

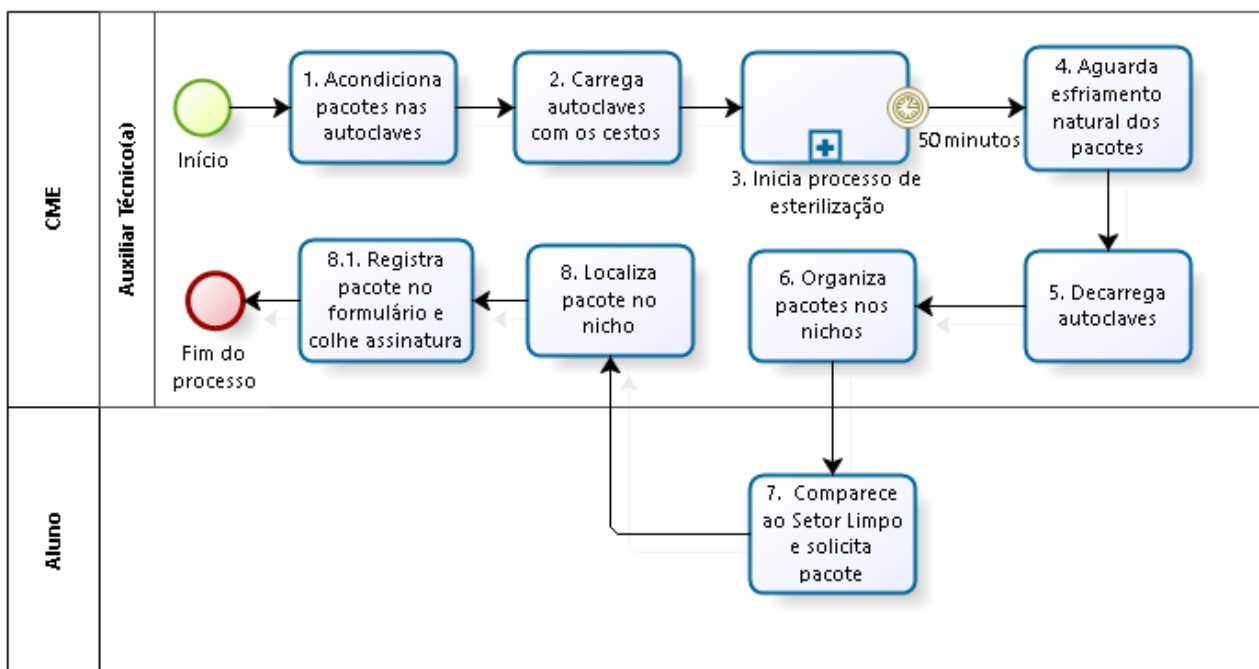

Powered by
bizagi
Modeler

IX. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão	Data	Histórico das Revisões	Item(ns) Revisado(s)	Revisado por
00	28/03/2016	Elaboração do documento	Todos	Adriano Peixoto

	Data	Nome	Órgão
Aprovado para uso	11/04/2016	Marcel Lautenschlager Arriaga	FOUFBA
Revisado	28/03/2016	Jandira Fernandez	FOUFBA
Elaborado	18/03/2016	Jandira Fernandez	FOUFBA
	18/03/2016	Paulo Marques	SUPAD

Elaborado por Jandira Fernandez / Paulo Marques	Aprovado por Marcel Lautenschlager Arriaga	Data 11/04/2016
---	--	---------------------------